

Her finder du BandaGisten Forssling & Co.



Industrivej 1
4180 Sorø
Tlf: 57 83 41 10 fra kl. 8.30
Mandag-torsdag: 7.30-16.00
Fredag: 7.30-14.00



Ahlgade 6G
4300 Holbæk
Tlf: 59 44 30 90
Mandag-fredag: 9.00-17.00
Lørdag: 10-13



Rådhuspladsen 8
4200 Slagelse
Tlf: 58 53 14 41
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 10.00-13.00



Elmegade 23
4400 Kalundborg
Tlf: 57 83 41 10
Efter aftale



Parkvej 46D
4700 Næstved
Tlf: 55 73 41 30
Mandag-fredag: 9.00-16.00
Tirsdag: 9.00-17.00

Brugervejledning til brokbælte



Virksomheden BandaGisten Forssling & Co.

Vi er et moderne firma med mange års erfaring og stolte traditioner i fremstilling af særlige kropsbårne hjælpemidler: Vi fremstiller individuelle hjælpemidler i høj kvalitet på vores produktionsværksted, hvor vi har dygtige fagpersoner med flere års erfaring og forskellige kompetencer. Vi bestræber os på at være opdateret på nyeste viden og teknologi. I vores butikker og klinikker har vi et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, når kroppen har behov for en særlig omsorg og en hjælpende "hånd" – eller vi vil være gode ved os selv.

Information fra BandaGisten Forssling & Co.

BandaGisten
Forssling & Co. A/S

BandaGisten
Forssling & Co. A/S

Information om dit brokbælte

Vi håber, at du bliver godt tilfreds med dit nye brokbælte og at det vil afhjælpe dine gener i hverdagen.

Vi tilråder dig, at anvende brokbæltet hver dag, når du er stående eller gående i dine daglige aktiviteter. Brokbæltet har den funktion, at det vil holde dit brok på plads, så det ikke buler frem på maven.

Ved liggende stilling bliver bulen mindre synlig.

Du har fået taget mål til dit brokbælte. Det betyder at brokbæltet passer til din krop og valget af brokbælte er overvejet nøje i samråd med dig og dine behandlere.

Nogle brokbælter er forsynet med lomme til hånden, som gør det praktisk og nemt at tage på og justere.



Nem og sikker brugerhåndtering.

Praktiske råd

For at få den bedste virkning af brokbæltet, skal du være i liggende stilling med bæltet under lænden, når du skal tage brokbæltet på.

Ved liggende stilling falder brokket, som regel på plads og bliver mindre synligt. Derfor skal du tage bæltet på i liggende stilling og når du rejser dig, vil brokbæltet holde brokket på plads.

Det er hensigtsmæssigt at have et brokbælte at skifte med.

Brokbælte og stomi

Nogle brokbælter er produceret af et stofmateriale, som arbejder i alle retninger. Den helt specielle struktur i materialet, gør bæltene komfortable.

Det er individuelt, om der ønskes eller er et behov for et hul i brokbæltet til stomiposen. Nogle brokbælter er produceret af et materiale, hvor stomihullet kan undlades. Afføring og urin kan sagtens passere ned i posen.

Hvis du bliver i tvivl om, at du måske ikke kan undvære hullet til stomiposen i dit brokbælte, kan din stomisygeplejerske rådgive dig. Du er også velkommen til at ringe til os og få en tid hos bandagisten.

Vores telefonnumre og adresser finder du på bagsiden af denne information.

Vi har ansatte på vores systue og værksted, som laver mange forskellige individuelle opgaver herunder også hul til stomiposen. Nogle ønsker en løsning med en påsyet stofstrimmel som kan holde posen på plads – se billede.



Vaskeanvisning

Bæltet er produceret af polyamid og elasthan.

Bæltet kan vaskes i maskine ved 40 grader. Brug gerne vaskepulver svarende til den farve dit bælte har.

Bæltet må ikke tørres i tørretumbler. Skal lufttørres ved almindelige stuetemperatur.

