

Her finder du BandaGisten Forssling & Co.



Industrivej 1
4180 Sorø
Tlf: 57 83 41 10 fra 8.30
Mandag-torsdag: 7.30-16.00
Fredag: 7.30-14.00



Ahlgade 6G
4300 Holbæk
Tlf: 59 44 30 90
Mandag-fredag: 9.00-17.00
Lørdag: 10-13



Rådhuspladsen 8
4200 Slagelse
Tlf: 58 53 14 41
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 10.00-13.00



Elmegade 23
4400 Kalundborg
Tlf: 57 83 41 10
Efter aftale



Parkvej 46D
4700 Næstved
Tlf: 55 73 41 30
Mandag-fredag: 9.00-16.00
Tirsdag: 9.00-17.00

Brugervejledning fodindlæg



Virksomheden BandaGisten Forssling & Co.

Vi er et moderne firma med mange års erfaring og stolte traditioner i fremstilling af særlige kropsbårne hjælpemidler: Vi fremstiller individuelle hjælpemidler i høj kvalitet på vores produktionsværksted, hvor vi har dygtige fagpersoner med flere års erfaring og forskellige kompetencer. Vi bestræber os på at være opdateret på nyeste viden og teknologi. I vores butikker og klinikker har vi et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, når kroppen har behov for en særlig omsorg og en hjælpende "hånd" – eller vi vil være gode ved os selv.

Information fra BandaGisten Forssling & Co.

BandaGisten
Forssling & Co. A/S


BandaGisten
Forssling & Co. A/S

Information om fodindlæg

Vi håber, at du bliver rigtig godt tilfredse med dine nye individuelle fodindlæg og at du får afhjulpet de gener du har haft med dine fødder.

Vi har efter undersøgelsen af dine fødder produceret kvalitets fodindlæg, som passer præcist til dig. I forbindelse med, at du får fodindlæggene udleveret, får du en mundtlig vejledning om brugen af indlæggene.

Vores ønske med denne pjeces er at supplere den mundtlige vejledning med gode råd og vejledning, hvis du kommer i tvivl.

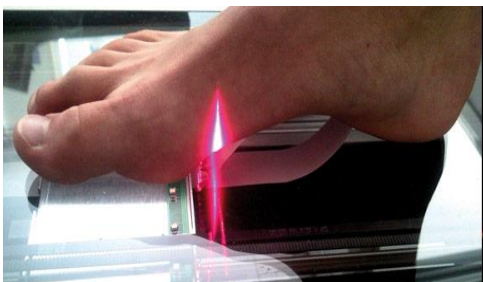

3D scanning af foden.

Brug af fodindlæg

Alle fødder er individuelle og selv hos den samme person, kan der være forskel på de to fødder. På grund af vores fødders opbygning er det også forskelligt, hvor lang tid det kan tage at vænne sig til at gå med indlæggene.

Mange personer kan fra starten bruge indlæggene hele tiden, men nogle har behov for en tilvænning i begyndelsen. Fødderne må gerne blive trætte og svagt ømme i starten, fordi vi har en del muskler og ledbånd i fødderne, som kan påvirkes.

Vi anbefaler at starte med 2 timer om dagen og så gradvis øge timeantallet de følgende 2-3 uger afhængig af, hvordan dine fødder reagerer på indlæggene.

Det er vigtigt at bemærke, at du må ikke få smerter eller vabler på fødderne.

Sikkerhed og service

Sunde fødder er glade fødder. Hos BandaGisten Forssling og Co. ønsker vi, at du får det bedste resultat, når du bruger dine nye fodindlæg.

Skulle der opstå trykmærker eller gener, tilretter vi dine fodindlæg uden beregning indenfor de første 3 måneder efter du har modtaget indlæggene. Vi benytter avancerede maskiner på produktionsværkstedet, så du hurtigt kan få dine indlæg igen.

Efter 3 måneder koster en konsultation 250,00 kr.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du finder diverse numre til vores klinikker på bagsiden af denne pjeces.



Vaskeanvisning

3D scannings individuelle fodindlæg, uden belægning, kan vaskes i vaskemaskine på 30 grader og meget gerne i vaskepose for at undgå beskadigelse fra maskinens tumbler på indlæggene.



Efter vask skal indlæggene ligge på et bord og tørre. Radiator, gulvvarme eller stærk sol vil medføre at indlæggene kryber og deformeres.

Læderindlæg og 3D scannings fodindlæg med belægning, kan tørres af med en let fugtig klud.

