

## Her finder du BandaGisten Forssling & Co.



Industrivej 1  
4180 Sorø  
Tlf: 57 83 41 10 fra kl. 8.30  
Mandag-torsdag: 7.30-16.00  
Fredag: 7.30-14.00



Ahlgade 6G  
4300 Holbæk  
Tlf: 59 44 30 90  
Mandag-fredag: 9.00-17.00  
Lørdag: 10.00-13.00



Rådhuspladsen 8  
4200 Slagelse  
Tlf: 58 53 14 41  
Mandag-fredag: 9.00-17.30  
Lørdag: 10.00-13.00



Elmegade 23  
4400 Kalundborg  
Tlf: 57 83 41 10  
Efter aftale



Parkvej 46D  
4700 Næstved  
Tlf: 55 73 41 30  
Mandag-fredag: 9.00-16.00  
Tirsdag: 9.00-17.00

## Bule på maven (brok)



### Virksomheden BandaGisten Forssling & Co.

Vi er et moderne firma med mange års erfaring og stolte traditioner i fremstilling af særlige kropsbårne hjælpemidler: Vi fremstiller individuelle hjælpemidler i høj kvalitet på vores produktionsværksted, hvor vi har dygtige personaler med flere års erfaring og forskellige kompetencer. Vi bestræber os på at være opdateret på nyeste viden og teknologi. I vores butikker og klinikker har vi et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, når kroppen har behov for en særlig omsorg og en hjælpende "hånd" – eller vi vil være gode ved os selv.

I samarbejde med din stomisygeplejerske  
finder vi det "bedste" brokbælte til dig


**BandaGisten**  
Forssling & Co. A/S

**BandaGisten**  
Forssling & Co. A/S

## Bule på maven omkring stomien

Efter en stomioperation er der nogle mennesker, der danner en bule på maven omkring stomien. Det kaldes et brok. Man mener, at det opstår på grund af en svaghed i mavemusklernerne ved den åbning, som stomien er ført igennem i forbindelse med operationen. Det er et forholdsvis almindeligt problem, og man kan formentlig ikke forebygge, at det sker. Bulen viser sig typisk uger, måneder eller år efter stomioperationen. Det er ikke noget, man selv har indflydelse på, og bulen er ufarlig.

Dog kan bulen medføre udfordringer med huden omkring stomien. Der kan opstå lækage, fordi stomiposen skal klæbe til en uregelmæssig og bulet overflade. Nogle personer oplever en tyngde fornemmelse og uregelmæssigheder i afføringen. Da bulen fylder på maven, betyder det at der kan opstå ændringer i kroppens udseende, og derfor kan der opstå problemer med at passe det vanlige tøj.

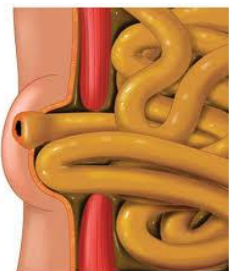

En bule (brok) ved, eller omkring stomien opstår på grund af en svækkelse af mavemuskulaturen efter operationen. Kirurgen laver et snit i mavemuskulaturen, fordi tarmen skal føres ud på maven. Bulen dannes, fordi der kan opstå en "brist" i musklen.

Bule (brok) dannet omkring stomien.

## Der er hjælp at hente

Man er ofte tilbageholdende med at operere for et stomibro. De fleste vælger at leve med det, fordi det er ufarligt. Et brokbælte er oftest den bedste behandling, fordi det hjælper med at støtte og holde bulen på "plads".

Din stomisygeplejerske vil i samarbejde med lægerne afgøre, om et brokbælte kan afhjælpe din situation.

Hos BandaGisten Forssling og Co. samarbejder vi med dine behandlere, om at finde den bedste løsning for dig. Der findes flere forskellige fabrikater, som producerer brokbælter. I dag er brokbælter produceret af behagelige og funktionelle materialer.

Et brokbælte er et kropsbåren hjælpemiddel, og er derfor omfattet af serviceloven. Derfor skal der sendes en ansøgning med lægehenvielse om at få bevillingen til kommunen. Når kommunen har behandlet sagen, får du tilsendt bevillingen, og kommunen betaler.

## Gode råd

I samarbejde med dig, finder vi det brokbælte, som er bedst for dig. Der er nogle gode praktiske råd i forbindelse med at tage det på. Når du ligger på ryggen, vil brokket som oftest falde på "plads". Derfor vil vi anbefale dig at ligge ned med bæltet under ryggen, når du tager brokbæltet på. Du kan nemt lukke det i liggende stilling. Når du rejser dig, vil bæltet holde bulen på plads. Det er vanskeligt i stående stilling at tvinge brokket på plads på grund af presset fra vores organer i maven. Du har sikkert bemærket, at i stående stilling, bliver bulen mere synlig.



Brok omkring stomi



I liggende stilling "falder bulen på plads"

## Vi vil anbefale dig at bestille tid

Hos BandaGisten Forssling & Co. har vi et stort udvalg i forskellige brokbælter.

Vi vil gerne se dig til en konsultation, da vi skal tage nogle mål af din mave, så vi kan finde det bedste bælte til dig. Derfor vil vi bede dig om at bestille tid i en af vores 5 klinikker. På bagsiden finder du vores klinikker, adresser og telefonnumre.

I vores samtale med dig, vil vi vurdere, om der er behov for at lave nogle individuelle tilpasninger. Langt de fleste behøver intet stomihul i brokbæltet.

Når du har anvendt bæltet i en periode, er det tid til at bestille et brokbælte til at skifte med. Hvis der er behov for justeringer, bedes du bestille en ny tid hos os. Skal bæltet ikke justeres, men passer perfekt, ringer du bare til os. Så fremsender vi et bælte mere.



## Vaskeanvisning

Brokbæltet kan maskinvaskes på højst 40 grader. Husk at lukke Velcro/hægter/lynlåse i bæltet. Brug aldrig skyllemiddel. Bæltet skal lufttørres. Det må aldrig tørres i en tørretumbler.